

ニエットキャリア II

難解な術式を要する「NIET」療法を効率的におこなえるよう、従来よりあった充填用キャリアを3Mix-MP用に改良し、貼薬着座の窩洞底に確実に3Mix-MPを充填することができる専用キャリアです。＊先端部のチップは交換できる仕様になっています。

薬剤の採取

練和したコンポジットレジンやペースト材料をチップに採取する要領で、標準稠度の3Mix-MPをキャリア先端の筒先に入れる。(いっぱいに入れると、一根管1回の貼薬で済む)

余分な薬剤の除去

キャリア先端の筒の外側に着いている薬剤を拭取る。

薬剤の貼薬

ニエットキャリアの先端が貼薬着座の窩洞底に達するように挿入し、挿入後レバーをいっぱい押し、薬剤を押出す。薬剤が押出された後、キャリアをゆっくりと引き上げる。

キャリアの清掃

筒内に残った3Mix-MPは硬くなる前に、専用洗浄液で超音波洗浄器にかけて洗浄する。



- ニエットキャリアII 標準 1本 9,000円
- ニエットキャリアII 小 1本 9,000円


一般医療機器 13B2X00094000222



- スペアパーツ (標準、小) 各 4,000円

3Mix-MP法® 用 3-2キャリアー

3Mix-MP法®における「Save Pulp 療法」及び「NIET療法」を効果的にを行うために開発された3Mix-MP法®用の専用インスツルメントです。

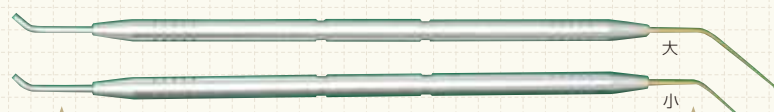

Side A



◀サイドAにはアクセサリー用ガタバーチャポイントの「太小」を差し込んでご使用ください。

Side B



◀サイドBにはチタンコーティングを施した半円球の裏装器として、ロングタイプとショートタイプの2種をご用意いたしました。

●3Mix-MP法®における「Save Pulp 療法」や「NIET療法」時の軟化象牙質や露出歯髄上などに貼薬する場合、薬剤がインスツルメントにくっついてスムーズに歯質に移らずイライラする事ありませんか?このキャリアーは、ガタバーチャポイントを利用することにより、薬剤とのリリースが容易です。

●サイドBのチップは、裏装材及びセメント泥の採取及び充填がし易いように先端を半円球にし、かつチタンコーティングを施しましたので、裏装材及びセメントとのリリースが容易です。

- 3-2キャリアーセット(大、小各1本) 7,200円
- 3-2キャリアー(大) 1本 3,700円
- 3-2キャリアー(小) 1本 3,700円

一般医療機器 11B3X00012000061

3Mix 保管専用容器

3Mixを使用する治療を成功させるポイントの1つに、薬剤の変質を防ぎ薬力価を落とさないことがあります。3Mix保管専用容器は、各種薬剤を保管する場合の望ましい容器の条件をクリアーしています。



セット内容 ●容器 5個(ラバーカップ内蔵)
表記シール 5枚、乾燥剤
8,800円

3Mix-MP® 用 洗浄液

- 3Mix-MP専用の洗浄剤です。インスツルメントにこびり付いて硬化した薬剤を溶解、洗浄します。
- 50ccまで計量(5cc単位)できるボトルです。
- 用法:計量槽側のキャップを少し緩めてから、ボディ(液体部)を指で押すと計量槽側に液体が移動します。




- 使用濃度:10倍希釈
- 洗浄時間:浸漬洗浄は30分以上
超音波洗浄器は5~15分
- 容量:1リットル
3,000円

※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。

ニエットバー

- 貼薬着座形成用CAダイアバーで、800～1200rpmで使用。ガイドバー及び#2「フラットタイプ」と合わせて使用。
- 練和された3Mix-MPを患部に充填した後、流れず、留めるための着座が必要であり、その形成用に使用。
- 特に根管口部の拡大、着座形成時に、従来のピーンリーマに代わり先端部にもダイヤが付着したダイアバーで、より効率的な削合が可能である。

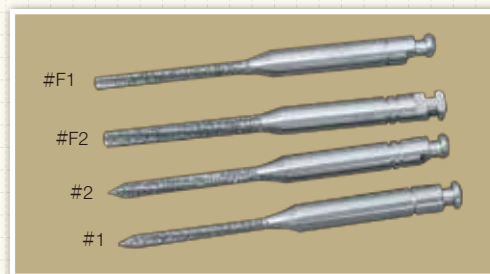

- ニエットバー #1=φ0.8mm (3本)
 - ニエットバー #2=φ1.0mm (3本) 各11,000円
 - ニエットバー (フラットタイプ) #F1=φ1.0mm (3本)
 - ニエットバー (フラットタイプ) #F2=φ1.2mm (3本) 各11,000円
 - アソート4本 (各1本) 16,000円
- 一般医療機器 13B2X00094000006

ニエットバー(フラットタイプ)

- #1同様、貼薬着座形成用CAダイアバーで、800～1200rpmで使用。
- #1で拡大後、根管口から2mm深く角型の貼薬着座形成時に使用。

CRインレー形成バー

- 3Mix-MP法でのCRインレー直接法を行う際に窩洞形成を容易にするFGダイヤモンドバーです。



- CRインレー形成バー 1本入 2,400円
- 一般医療機器 13B2X00094000096

PPSキャリア




先端径0.8mm

- 3Mix-MPを患部に充填する際に使用します。特に歯周ポケット内の貼薬に便利なキャリアです。

*使用後は筒内に残った薬剤が硬化する前に、専用洗浄液を使って洗浄してください。

- PPSキャリア 1本入 7,500円
- 一般医療機器 13B2X00094000150

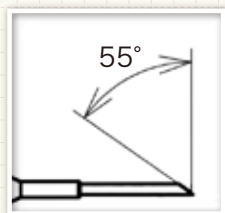

3Mix 乳鉢セット



4,800円



オフィシャルDVD(宅重豊彦監修) 販売終了

●3Mix-MP法 薬の作り方



V1.1 (30分)
5,000円

●3Mix-MP法 治療編①



【Save pulp療法
CR-Inlay 直接法】
(40分)
15,000円

●3Mix-MP法 治療編②



【感染根管治療
LSTR
3Mix-MP NIET
・NIET
CR-Inlay法
・NIET
Metal Inlay法】
(54分)
15,000円

●3Mix-MP法 治療編③



【重症な歯髄炎の
治療法
Save Pulp療法
下顎左6番】
(50分)
15,000円

※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。

ご用命は



株式会社日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪本社：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

<http://www.dentalsupply.co.jp/>