

クリエイション Accessories

WILLI GELLER
Creation



■モデリングリキッド (ML-H / Modeling Liquid)

築盛用のリキッド、モデリングリキッドは、築盛中の陶材が崩れず、操作性を良くするために作られました。陶材とモデリングリキッドは比重がほぼ同じになっており、このリキッドで練和した陶材はホイップ状で練り上がって、築盛中に垂れてきません。また、築盛後は、ティシュペーパーの上に 10 分程度置き、水分を少なくしてから焼成して下さい。デンティンのカットバックはコンデンスしてから行くと形がとりやすいだけでなく、焼成後の収縮量も抑えることができます。

■容量 1,000ml ¥32,000 / 250ml ¥11,000 / 50ml ¥2,900



■ユニバーサルリキッド (UF GL / Universal & Glaze Liquid)

ステイン用、または、ペーストオベークの希釈用リキッドとして用います。粘性があり、乾燥しにくいという特性を持っています。パレット上の築盛する陶材にユニバーサルリキッドを1〜2滴混ぜることで乾燥しにくくすることができます。築盛中に陶材が乾いてしまうと、ファーンズの炉口が閉まる前に陶材が崩れるように割れることがあります。

■容量 50ml ¥7,000 / 25ml ¥4,500



■ショルダーリキッド (SPL / Shoulder Liquid)

ショルダーポーセレン用のリキッドです。ショルダーリキッドで陶材を練和すると適度に固まる性質がありますので、作業用の石膏模型から外しやすくなります。ショルダーリキッドで練和した陶材は、練り直して再利用することができます。

■容量 50ml ¥3,500 / 25ml ¥2,400



■モイスチャリングフルード (MF / Moisturing Fluid)

広範囲な修復と複雑な訂正のためのモイスチャライザーとして乾燥させずに築盛ができます。大きなブリッジの築盛に有効です。

■容量 25ml ¥12,000



■クリアペン (CREAPEN)

ポーセレンマージンで使用する分離剤です。専用のショルダーリキッドと併用すれば分離効果が更に高くなります。ペンタイプの形状になっていますので塗布しやすくなっています。

■ ¥9,000



■ガラスプレート (CREATION-Glass Plate)

厚さ 1cm、幅 30cm、奥行き 16cm で、重さは 1.2kg となっています。中央には裏面から Creation のロゴが入っています。

■ ¥14,000



クリエイション Accessories



WILLI GELLER
Creation

■築盛用ブラシ (CREATION-Brushes)

筆はいずれもコリンスキーを使用しており、適度なコシがあります。

ブラシⅠ 太筆 ¥15,000

ブラシⅡ 平筆 ¥7,000

ブラシⅢ 中筆 ¥7,000

ブラシⅣ 小筆 ¥2,400

ブラシⅥ ペーストオペーク用筆 ¥7,000



■クレアアロイボンド (Crea alloy bond)

メタルフレームとセラミックとの緩衝材です。熱膨張係数の大きいコバルトクロムなどのノンプレシヤスメタルの熱膨張係数の違いを調整します。

■¥22,000 8g



■メイクアップミキシングトレイ (MakeUp mixing tray)

ステイン用のパレットです (フタ付き)。

■¥18,000



*価格は希望医院価格です (価格には消費税は含まれません)

管理医療機器 226AFBZX00021000
製造販売元

株式会社 日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西 5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご用命は