

歯科材料(49) 医療用穿刺器、穿削器、穿孔器
一般医療機器 歯科用マンドレル JMDN35170000

ジョタマンドレル

【形状・構造及び原理等】(**)

- ・形状、型式
305/050



305/080



- ・軸部(シャンク) : JIS T-5504-1 φ2.35mm
- ・原理 : 研磨材、研削材を取り付け補綴物の研磨、研削等に使用する。
(*)

【使用目的又は効果】(**)

- ・研削砥石、研磨ディスク、丸のこ、ドリルビット、旋盤の主軸台等の回転式歯科用切削器具や研削・研磨に用いるディスク、石、カップ等を保持するシャフトをいう。(*)

【使用方法等】(**)

- ・ディスク、ポイントに合わせてマンドレルを選択し、装着する。
- ・ディスク、ポイントを装着したマンドレルをハンドピースに装着し、回転させ断続的に被切削物に押し付けて研磨、研削する。

【使用上の注意】(**)

- ・ハンドピースメーカーの指定に従ってシャンクを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。(*)
- ・錆び、損傷、変形(表面キズ、曲がり、汚染)等のあるものは使用しないこと。
- ・目を保護するために保護メガネ等を使用すること。
- ・使用前に回転させて振れがないことを確認すること。(*)
- ・本製品を使用する際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所集塵装置、公的機関が認知した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。(*)
- ・本製品により研削した粉塵、破片が目に入らないように注意すること。万一目に入った時には、すぐに流水で洗浄し、医師の診断を受けること。(*)

【保管方法及び有効期間等】(**)

- ・水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないように保管すること。
- ・本製品は歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】(**)

製造販売業者
株式会社日本歯科商社
製造業者
ジョタ社(スイス)
(英名) JOTA AG