

ハンドピース用ツール

リベッティングハンマー

Rivetting Hammers




リベッティングハンマー
ノーマル 1850



リベッティングハンマー
ツイン 1860



リベッティングハンマー
チゼル 1850/1

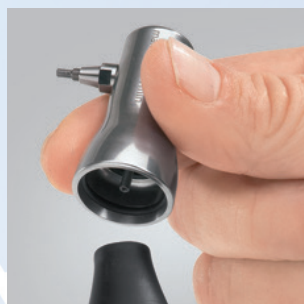

- 本体内部に装着されている2.35mmのシャンクを、バーと同じようにハンドピースに取り付けることにより回転運動を縦方向に変換します。
- ツインタイプは一方にプラスチックキャップを装着しており緩衝を和らげます。
- リベッティングハンマーによる微細な振動により、外れなくなったインプラント上部構造体を振動で外すことができます。(ノーマル、ツイン)
- チゼルタイプはリン酸塩系埋没材の掘り出しに便利で、サンドブラスターによるアルミナの消費を節約できます。またマウスガードなどの樹脂も切断できます。
- ほとんどの技工用ハンドピースに装着可能です。
- 先端は高炭素クロム鋼材を使用しており耐久性に優れています。

注意：回転数は15,000min⁻¹以下でご使用ください。

- **価格**：リベッティングハンマー ノーマル1850 61,000円
リベッティングハンマー ツイン1860 71,000円
リベッティングハンマー チゼル1850/1 61,000円

- **別売**：ハンマーチップ 1863 1,400円
チゼルチップ 1863/1 3,600円
プラスチックキャップ 1863/2 1,100円

製品についての詳細は
弊社ホームページを
ご覧ください。



<http://www.dentalsupply.co.jp/>

※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。



株式会社日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪本社：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご用命は