


機械器具(39) 医療用鉗子  
一般医療機器 歯科技工用鉗子 JMDN70935000

## ブルークリップ

### 【形状・構造及び原理等】(\*)

・形状、型式                      オーダーナンバー  
No.1 . . . . . 310 0008 1

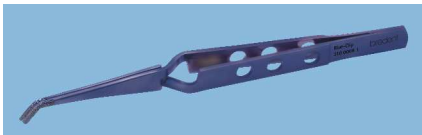

No. 2 . . . . . 310 0008 2



No.3 . . . . . 310 0008 3



- ・材質：ステンレス鋼
- ・先端部：ダイヤモンド砥粒
- ・原理：球状や円筒状の細かなパーツを保持するために使用します。

### 【使用目的又は効果】(\*)

- ・歯科技工用の器具で、金属片、ワイヤ等の屈曲、切断、豊隆及び石膏等の破壊に用いるものをいう。電動式のもの除く。

### 【使用方法等】(\*)

- ・先端部のチップにより補綴物などを確実に保持する。

### 【使用上の注意】(\*)

- ・本製品を切削、打刻(刻印)等の二次加工することは破折、錆び等の原因になるので行わないこと。
- ・錆び、損傷、変形(表面キズ、曲がり、汚染)等のあるものは使用しないこと。
- ・可動部の動きがスムーズであることを確認すること。
- ・使用後は汚れ等を除去すること。
- ・強酸、強アルカリの洗剤等は器具を腐食させる恐れのあるものは使用を避けること。
- ・金属たわし、クレンザー(磨き剤)等は器具の表面を損傷するので汚物除去、及び洗浄時に使用しないこと。

### 【保管方法及び有効期間等】(\*)

- ・水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露、外圧(物理的負荷)を避け、及び汚染を受けないように適切に保管すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】(\*)

製造販売業者  
株式会社日本歯科商社  
製造業者  
ブレーデント社(ドイツ)  
(英名) bredent GmbH & Co. KG