

製品ラインナップ



毎日の洗浄をもっときれいに、シンプルに

clene クリネ

義歯につきやすいカンジダ菌の除去に特化した義歯洗浄剤。
義歯の材質や金属付与の有無を問わず、毎日安心してご使用いただけます。



着色汚れを短時間で落として白さを取り戻す

clene white クリネホワイト

お茶やコーヒーによる黄ばみやタバコのヤニなどの頑固なステイン汚れを短時間で強力に落とし、白く輝きのある入れ歯に戻します。



ざらつく歯石を溶かしてつややかな表面へ

clene melt クリネメルト

歯石や歯垢などのカルシウム系固着物を強力に溶かして落とします。
金属や床材料など、入れ歯の材質を選ばず使える歯石ケア洗浄剤です。

義歯材料への影響

	材料	クリネ	ホワイト	メルト
床材料・裏装材	人工歯	○	○	○
	床用レジン	○	○	○
	ノンメタルクラスプ用樹脂	○	○	○
	シリコーン系軟質裏装材	○	○	○
	アクリル系軟質裏装材	○	○	○
	ティッシュコンディショナー	×	×	○
金属材料	コバルトクロム合金	○	○	○
	チタン系	○	○	○
	金銀パラジウム合金	△	×	△
	銀合金、銀ロウ	×	×	×

※ 研磨状態などにより変色が起こる可能性があります。

関連製品



やわらか入れ歯ブラシ

極細のやわらかい毛が、義歯をやさしく包み込み、表面を傷つけずに安心して磨くことができる義歯ブラシです。



ウロハミック

ワンランク上の洗浄を提案する携帯用超音波洗浄器。落ちにくいニオイやヌメリを微細な振動で解消します。

汚れに合わせて選べる義歯洗浄剤

clene



毎日の入れ歯洗浄に
プロ仕様の高機能洗浄剤

義歯の汚れに合わせて選べる。

義歯には着色、雑菌、歯石などの様々な種類の汚れが付着します。
義歯を清潔に、快適にご使用いただくためには毎日の義歯洗浄が必須です。
汚れの種類に合わせて特化した高機能洗浄剤、クリネシリーズ。
生活を支える義歯、汚れと用途に合った洗浄剤で清潔な毎日を。

毎日の洗浄をもっときれいに、シンプルに。


clene クリネ

内容量 1箱30錠 形状 錠剤 液性 中性 希望医院様価格 ¥1,300 希望患者価格 オープン




カンジダ菌を99.9%除去

カンジダ菌は義歯性口内炎や誤嚥性肺炎の原因となる汚れで、義歯洗浄において最も課題となる菌です。
クリネはカンジダ菌を5分で99.9%除去。優れた除菌力を発揮します。
毎日使う義歯だから、清潔に安全に保ちましょう。

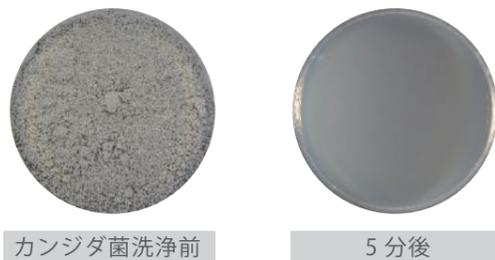

様々な汚れに効果を発揮

ヌメリや臭い、着色など入れ歯を毎日使う上で気になる汚れに多角的にアプローチします。新成分のCPCとIPMPを配合。
今まで洗浄成分が浸透しきれなかったバイオフィルムの深層まで浸透殺菌、清潔な状態が長続きます。

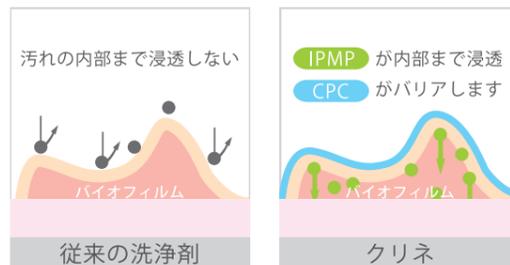

幅広い素材に安心して使える

金属がついているもの、ノンメタルクラスプ、軟性裏装…入れ歯の種類は様々です。クリネは様々な種類の材料に対し試験を実施しています。
部分義歯と総義歯を使用する方も、クリネひとつで対応可能です。
※一部で使用いただけない素材がございます。裏面の表をご確認ください。



化粧品のような美しいパッケージ

クリネシリーズは洗浄剤だけでなく、見た目の美しさにもこだわっています。
化粧品のよう、洗面台に置いておいても、他人に見られても恥ずかしくない清潔感のあるデザインを採用しています。



着色汚れを短時間で落として白さを取り戻す

clene white クリネホワイト

内容量 1箱50回分 形状 粉末 液性 強酸性 希望医院様価格 ¥1,600 標準患者価格 オープン

着色汚れを強力洗浄

コーヒーやタバコ、ワインなど毎日の使用の中で付着する黄ばみやヤニなどのくすんだステイン汚れを、酸の力で強力除去。
20分の短時間で白く輝きを取り戻します。汚れの気になるときの集中ケアにおすすめです。



優れた消臭力で気になる臭いもすっきり

香りの強い食事を食べたあとの気になるにおいやタバコの残り香も強力に消臭します。
短時間で気軽にケアできるので、人に会う前や外出前のエチケットとしてご使用いただけます。

ざらつく歯石を溶かしてつややかな表面へ

clene melt クリネメルト

内容量 1箱30包 形状 粉末 液性 酸性 希望医院様価格 ¥1,300 標準患者価格 オープン

カルシウム汚れを強力洗浄

一度ついてしまうと取ることが難しく、表面もザラザラとしてしまう歯石汚れをしっかりと溶かして落とします。
ゆるやかに汚れを溶かし、気になるヌメリや表面のざらつきもきれいに除去して気持ちの良い使い心地を取り戻すことができます。



義歯の素材を選ばず使える

歯石除去用の洗浄剤は金属への影響が強いことが一般的です。
クリネメルトは有機酸のみで安心の処方。金属がついた義歯にも使うことができます。