

機械器具(65) 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用充填・修復材補助器具 JMDN38782000

デンバー スティッキーブラシ

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
株式会社 日本歯科商社


製造業者
デンバー社 (USA)
英名 Denbur, Inc.

【禁忌・禁止】

1. 目的以外の使用禁止: 歯科診療・歯科治療以外には使用しないこと。
2. 注意事項の厳守: 器具の正しい使用のために、注意事項を必ず守ること。
3. 異常時の使用禁止: 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
4. 改造の禁止: 器具の形態変更や改造等はないこと。
5. 再使用禁止

【形状、構造及び原理】

1. 形状・形式
[外観写真]

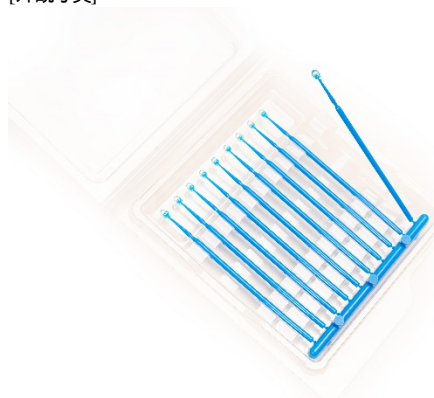

寸法
長さ 92mm 幅 2.7mm

2. 原材料
柄部: ホモポリマー
3. 包装
70本入/パック

【使用目的又は効果】

本品は、粘着性のある先端を用いて、口腔内に充填剤、又は修復物を適用する。

【使用方法】

ケースから1本取り出し、粘着部でインレー、アンレー、クラウン、ラミネートベニア、バンド、ブラケット、クラスプなどを保持し口腔内に適用する。

【使用上の注意】

本品の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた場合には使用を中止し、専門医の診断を受けさせること。

【保管方法及び有効期間】

[保存方法]

- 1) 冷暗所に保管すること。
- 2) 粉塵や化学製品を避け、清潔な乾燥した場所にて保管すること。