

歯科材料(07) 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用パターン成形品 JMDN31836030

GEO バーワックス

【形状・構造及び原理等】(**)

- 形状、型式 オーダーナンバー
- リンガルバー 667-3042



- ・本製品は歯科医療従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】(**)

製造販売業者
株式会社日本歯科商社
製造業者
レンフェルト社(ドイツ)
(英名)RENFERT GmbH

- ワックスバー 0.6mm 668-3006
- ワックスバー 0.8mm 668-3008
- ワックスバー 1.0mm 668-3010
- ワックスバー 1.2mm 668-3012



- ・主成分：パラフィンワックス、カルナウバロウ、色素
- ・リンガルバー：4×2mm
- ・ワックスバー：厚さ 0.6mm 0.8mm 1.0mm 1.2mm
- ・原理：症例にあわせてパターンを加工し、補綴物の蠟型を作製するために使用する。

【使用目的又は効果】(**)

- ・修復物等の製作に用いる既存パターンをいう。材質はワックス、レジン等からなる。歯科用ワックス成形品に該当するものを除く。

【使用方法等】(**)

- ・カービング・埋没は通法に従い作業する。
- ・症例にあわせパターンを加工して使用する。

【使用上の注意】(**)

- ・本製品は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。
- ・使用場所には消火器を備えること。
- ・他の製品と混用しないこと。
- ・本製品を使用するには必ず換気をしながら使用すること。
- ・本製品が目に入らないように注意すること。万一目に入った時にはすぐに流水で洗浄し、医師の診断を受けること。(*)

【保管方法及び有効期間等】(**)

- ・室温保管
- ・本製品を高温となる場所(ストーブの側、直射日光のあたる場所)に放置しないこと。
- ・使用及び保管場所には消火器を備えること。
- ・本製品は火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に多量に保管しないこと。