

咬合面シリコンパターン

ナソフレックス プレミアム

厚さ0.5mmの特殊シリコン製咬合面パターン。
 簡単な操作で、ワックスアップ、レジン・ポーセレン
 築盛時の咬合面形態を短時間に作製でき、
 作業時間を大幅に短縮できます。
 優れた強度により繰り返し何度でもご使用できます。



短時間で機能的咬合面を簡単に作製

ポーセレン咬合面

レジン咬合面

ワックス咬合面





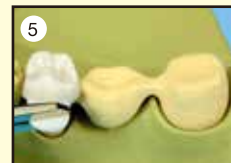



▶ 作業手順





●ワックス咬合面の作製

 <p>1 通常に従いコーピングを作製します。</p>	 <p>2 本製品の厚さは0.5mmですので、作業前に咬合器のバイトを0.5mm挙上させておきます。</p>	 <p>3 本製品内面にワックスを流して入れます。(分離材は必要ありません)</p>	 <p>4 ワックスが固まりだしたら、コーピング上にのせます。</p>	 <p>5 対合歯と咬ませて圧接します。</p>	 <p>6 大臼歯も同様に行います。ワックスを少量流してコーピングとGF内のワックスを固定させます。</p>
 <p>7 ピンセットを使って本製品をゆっくりと剥がします。</p>	 <p>8 ポンティックの場合も同じ手順をおこないます。</p>	 <p>9 ワックスを少量流してコーピングと本製品内のワックスを固定させます。</p>	 <p>10 ピンセットを使って本製品をゆっくりと剥がします。滑沢で正確な咬合面形態が仕上がります。</p>	 <p>11 咬合状態を確認しながらバイトの調整をおこないます。</p>	 <p>12 最終的な咬合調整をすませ、隣接面のコンタクトをつけて、歯冠形態を仕上げます。</p>

●ポーセレン咬合面の作製

 <p>1 通常に従いオバークを焼成し、模型にセットします。焼成後の収縮を考慮して、ワンサイズ大きいナソフレックスを使用します。</p>	 <p>2 イソフィックス分離材を本製品内面に塗付します。</p>	 <p>3 指で軽くはいて余剰の分離材を飛ばしてください。</p>	 <p>4 咬頭部分にエナメルを盛り、ブラシでマージン方向に薄く伸ばします。そのあとデンチンを全体に築盛します。</p>	 <p>5 気泡に注意しオバークの咬合面にゆっくりと乗せます。対合歯と咬ませ圧接した後デンチンを少量盛り、ナソフレックス内の陶材とブリッジを固定し乾燥させます。</p>	 <p>6 他の部位も同様に作業します。ピンセットを使って本製品をゆっくりと剥がしてから、他の部分の歯冠形態を仕上げます。</p>
--	--	--	--	---	--

●レジン咬合面の作製

 <p>1 通常に従い歯冠形成を行い、咬合面にデンチンを盛っておきます。</p>	 <p>2 内面の咬頭部分にエナメルを入れ、咬合面にデンチンを盛っておきます。</p>	 <p>3 築盛した本製品をそれぞれにセットし、対合歯と咬ませ照射器で仮重合(約20秒)します。</p>	 <p>4 隣接のコンタクトを合わせて、全体の歯冠形態を仕上げた後最終重合をします。</p>
--	--	---	--

ナソフレックス・プレミアム

フルセット
16形態 × 3サイズ(A, B, C)
計48個入



イソフレックス
(陶材用分離材 20mL) 1本
価格**9,700円**



イソフレックス

フルセット

左右上下顎小白歯8個・大白歯8個 ×サイズA、B、C
計48個入 価格**169,000円**

ミニセット (各サイズ16個入)

Aセット
左右上下顎小白歯8個・大白歯8個
計16個入 価格**67,400円**

Bセット
左右上下顎小白歯8個・大白歯8個
計16個入 価格**67,400円**

Cセット
左右上下顎小白歯8個・大白歯8個
計16個入 価格**67,400円**

単品1個 価格**5,500円**

※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。

▶ 形態チャート

※写真のサイズは原寸大です。

								サイズ C
17C	16C	15C	14C	24C	25C	26C	27C	オーダーNo.
								サイズ B
17B	16B	15B	14B	24B	25B	26B	27B	オーダーNo.
								サイズ A
17A	16A	15A	14A	24A	25A	26A	27A	オーダーNo.
								サイズ A
47A	46A	45A	44A	34A	35A	36A	37A	オーダーNo.
								サイズ B
47B	46B	45B	44B	34B	35B	36B	37B	オーダーNo.
								サイズ C
47C	46C	45C	44C	34C	35C	36C	37C	オーダーNo.

製造販売元

株式会社日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

<http://www.dentalsupply.co.jp/>

ご用命は



JAPAN DENTAL SUPPLY