

機械器具 39 医療用鉗子
一般医療機器 歯科矯正用プライヤ（JMDN コード:33209000）

コウワイヤーカッター

【形状・構造及び原理等】



材質：ステンレス鋼
プラスチック（把持部ホルダー）
ビニール樹脂（ハンドルカバー）

【使用目的又は効果】

歯科技工用の器具で、金属片又はワイヤーを屈曲又は切断するために用いる。切断時に、ワイヤーが飛ばないように先端部で把持する。

<使用目的>

～φ1.2mm までの歯科用線の切断に用いる。

【品目仕様等】

項目	仕様等
外観	本体全周にバリがなく、破損、変形、傷、ヒビなどの異常がないこと。

【使用方法等】

ハンドルを手指でしっかり固定し、先端部で歯科技工用ワイヤーを切断する。

【使用上の注意】

1. 本品は口腔内で使用しないこと。
2. 本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症のある場合は直接触れないようにすること。また、使用により過敏症状があらわれた場合には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けること。
3. ビニール樹脂部が変形するため、滅菌しないこと。
4. 破損や事故等の原因となるので、曲げ、切削、打刻等の二次加工（改造）は行わないこと。
5. 本品に破損、変形、傷、ヒビなどの異常があった場合は使用しないこと。
6. 本品は切断許容範囲外のワイヤーには使用しないこと。
：～φ1.2mm

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

1. 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
2. 「もらい錆」を防ぐため、錆びている器具と一緒に保管しないこと。また、化学製品と一緒に収納・保管しないこと。

【保守・点検に係る事項】

1. 汚れは柔らかい布等で拭き取ること。
2. 洗浄する場合は、磨き粉や金属ウール・金ブラシ・ヤスリ等、腐食（錆）の原因となる銅製工具を使用しないこと。また、腐食防止のために直ちに乾燥すること。
3. 長期の使用により金属疲労や摩耗等の劣化が生じるので、適時交換すること。

【包装】

1 包装/1 本入り・把持部交換用ホルダー1 セット

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：有限会社オーラルアカデミー
住 所：〒165-0025 東京都中野区沼袋三丁目 30 番 15 号
電 話 番 号：03-5380-2336
F A X 番 号：03-3389-6810

製 造 業 者：株式会社 ツノダ
住 所：新潟県三条市塚野目 2171