

ベーシックエコ用タンク交換方法



対象機種(型式)

- ・ベーシックエコ1タンク 2949-5050
- ・ベーシックエコ2タンク 2949-5025

※注意：ベーシックエコのタンクはお客様で交換できる機種になっております。

下記に手順に沿って交換をお願い致します。

※注意：タンク単体の修理も対応しております。

※注意：タンク交換する際、コンプレッサーに接続しているエアーチューブ及びフットスイッチ(エアーチューブ)はそのままの状態の問題ございません。

1, 交換するタンクを選択して下さい。

2, 交換するタンク側の本体を横に向きして下さい。

3, 写真①の赤色○のパッキンを本体下側に外して下さい。





4, 写真②, 緑色○をフック(2箇所)を外します。



5, タンク固定ネジを緩めます。(反時計回り)
※写真③, 水色○2箇所になります。



6, 写真④紫色○のエアーチューブを外して下さい。
※エアーチューブはワンタッチ式になります。

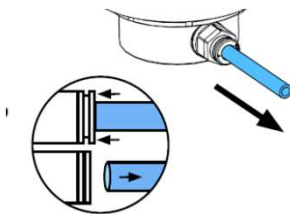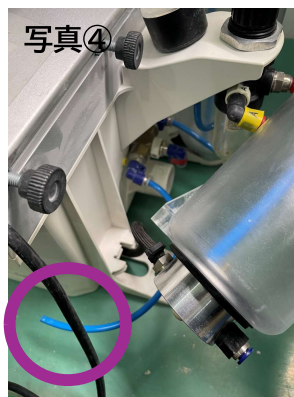

7, タンクの交換ができます。

※修理の際は手順1～7に沿って
交換をお願い致します。

ご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせ下さい。



(株)日本歯科商社
品質保証部 修理室
03-3625-3111
作成日：2025/07/31