

MT 3モデルトリマトラブルシューティング ～水漏れ対処方法について～




対象機種： MT 3モデルトリマ(1808-2000)

本資料は、本製品の「**水漏れ**」に関する対処方法についての資料になります。

水漏れの主な原因は、以下の3つのパターンに分類されます。

パターン1：正面カバー（ドア部）の下部から水漏れが発生します。※該当箇所は写真1の**赤枠**部分です。


写真1

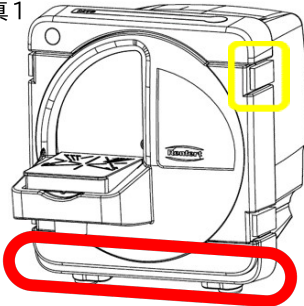

対処方法としては…

- ↓ 正面から見て、写真1の**黄枠**で示したフックを4か所を外してください。
- ↓ 正面カバーを取り外してください。
- ↓ 写真2の**青枠**部分に石膏などの異物が付着していないか確認してください。付着している場合は、水漏れの原因となるため、すべて除去してください。
- ↓ 取り外した正面カバーのゴムパッキン（黒色またはグレー色）についても、同様に石膏などの異物を除去してください。
- ↓ 正面カバーを元通りに取り付けてください。

写真2

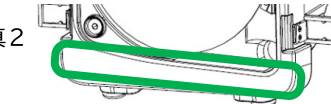

正面カバーゴムパッキン
※石膏等が固着して
いないか確認して下さい。

→ 水漏れが解消した場合は、そのままご使用ください。

→ 水漏れが解消しない場合は、ゴムパッキンの摩耗・劣化が考えられます。
下記部品をご確認のうえ、ご使用のディーラー様へご注文ください。

製品名「MT 3用 ドアパッキン 90003-6511」

パターン2：給水レバー周辺で水漏れが発生しています。※該当箇所は写真4の**赤枠**部分です。

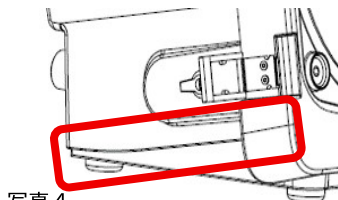


写真4

対処方法としては…

- ・給水電磁弁の故障が原因と考えられます。
- ・修理が必要となりますので、弊社へ修理をご依頼下さい。

パターン3：給水部周辺で水漏れが発生しています。※該当箇所は写真5の**赤丸**部分です。

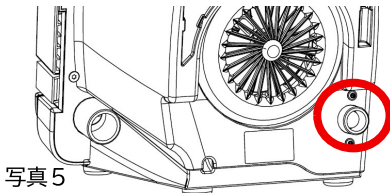


写真5

対処方法としては…

- ・給水ホース内部のパッキンが消耗しています。
- ・下記製品を販売店様またはディーラー様へご注文ください。

製品名：MT3給水ホース PT17-1-1.5

ご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせをお願い致します。

製品についての詳細は
弊社ホームページから▶

<http://www.dentalsupply.co.jp/>



株式会社 日本歯科商社

作成者:品質保証部 修理係

東京本社 〒130-0011 東京都墨田区石原1-19-5 TEL(03)3625-3111

大阪支店 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-3-9 TEL(06)6643-0085

北海道営業所 〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL(011)716-7001

九州営業所 〒812-0893 福岡市博多区那珂4-16-22 TEL(092)436-2288

作成日：2026/08/04