

サイレントコンパクト(CAM)のモーター交換サイン



対象機種(型式)

- ・サイレントコンパクト 2934-1500
- ・サイレントコンパクトCAM 2934-3500

注意1：モーターは消耗品になります。ご使用していく上で必ず交換が必要な部品になります。

注意2：モーターの使用時間は約1000時間になります。(ご使用時間は、ご使用方法によって異なります。)

下記の症状の場合は、モーター交換のサインになります。

- ・吸引しない。
- ・吸引が弱い。吸引が止まる。
- ・吸引はするが、焦臭い、異音がする。



このような症状の際は、次の確認をしてください。

電源ONにした際、バイブレーション機能後に**前面パネルが点灯**しているかどうか確認してください。

→はい：モーターが消耗しております。モーター※を購入し交換をお願い致します。

→いいえ：機械内部の故障。修理依頼をお願い致します。

※製品名：サイレントコンパクト/CAM用モーター90003-7226

モーターの交換方法については、下記の弊社ホームページもしくは、QRコードからご参照ください。



日本歯科商社ホームページQRコード



モーター交換動画QRコード

モーターの使用時間(累計)の表示方法について

注意：モーター使用時間は累計になりますので、交換する毎に記録して頂くと使用時間を正確に把握できます。

リセット機能はございません。

モーター累計時間の表示方法の手順になります。QRコードからご参照ください。



モーター累計時間資料用QRコード

ご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせ下さい。



(株)日本歯科商社
品質保証部 修理室
TEL:03-3625-3111
作成日：2025/09/18