

# オストロマットバックアップリカバリーについて



## 対象機種(型式)

- ・オストロマット654
  - ・オストロマット624
  - ・オストロマット624i
- ※本機製品はoral designになります。

バックアップリカバリーは本機の不具合(調査)をデケマ社へのデータ診断を行う為の作業になります。機器の構成等ではございません。予めご了承ください。

※必要な備品は、USB(容量は5GB)が1個。未使用の物(削除済み)。

下記の手順に沿って行って下さい。

1, ディスプレイ上, 「プログラマネージャー」を表示して下さい。



2, プログラマネージャー上で画面右下「セットアップ」をタッチして下さい。

3, セットアップ上, 「バックアップリカバリー」をタッチして下さい。



※バックアップリカバリーをタッチ後, 本機背面右側下にUSBの差込口があります。2口ありますのでどちらかに挿入して下さい。

4, バックアップ/リカバリー上, 「バックアップ開始」をタッチして下さい。

※バックアップリカバリーは約15分から20分程度の時間が掛かります。

5, 画面上には「バックアップが完了しました」と表示されます。

6, USBを取出して, セットアップをタッチして作業は終了になります。

※USBはお使いディーラー様か弊社へお送りをお願い致します。

ご不明な点がございましたら, 弊社までお問い合わせ下さい。



(株)日本歯科商社  
品質保証部 修理室  
TEL:03-3625-3111  
作成日:2026/01/21