

# オストロマットソフトウェアのアップデートについて



## 対象機種(型式)

- ・オストロマット654
  - ・オストロマット624
  - ・オストロマット624 i
- ※oral designになります。

デケマ社は本製品のソフトウェアバージョンのアップデートがございます。

随時アップデートをお願い致します。現在はソフトウェアの「**Ver6.06**」になります。

ご使用の機器のソフトウェアバージョンの確認方法は…

→セットアップ画面を表示→「**ファーンレスID番号**」をタッチ→画面に現在のバージョンが表示されます。

●ソフトウェアバージョンのアップデートを行わないと…

- ・機器の動作が不安定になる。
- ・新規の焼成プログラムが取り入れられない。 など

●ソフトウェアバージョンアップデートの手順方法について

## ※注意事項

→アップデートする際は本機焼成温度（50℃未満）にて行って下さい。

→アップデートでの使用時間は約10分のお時間が掛かります。

1, ソフトウェアのアップデートする機器を準備して下さい。

2, メインスイッチをOFFにします。

画像1の□にUSBを挿入します。

※USBには最新バージョンのデータが入っております。

最新データのダウンロード先→<https://www.dekema.com/ja/service/media/624>

3, メインスイッチをONにして下さい。

4, 最新のソフトウェアのデータの読み込みを開始します。画面上に英文等が表示されます。

5, 本機からビープ音がなります。バージョンアップが終了になります。

6, ディスプレイは通常時の起動画面になります。USBは抜いて下さい。

7, ソフトウェア・バージョンの確認方法は

プログラムマネージャーの画面右下「セットアップ」をタッチします。

8, セットアップ画面上, 「**ファーンレスID番号**」をタッチ,

現在のバージョンが確認が出来ます。※画像3


ソフトウェアバージョンのアップデートが終了になります。



画像1



画像2

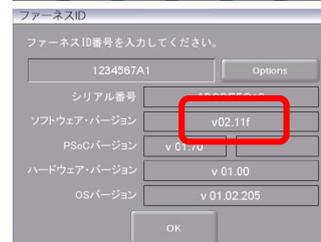

画像3

ご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせ下さい。



株日本歯科商社  
品質保証部 修理室  
TEL:03-3625-3111  
更新日: 2026/01/22