

タイニープラスⅢ 砂詰まり対処方法

①本体の詰まり

* 治具を使う前にエアーで吹いて詰まりを取ってください。



ハンドピース中央部の回転部分を押さえヘッドを回転させると外れます。



本体が詰まっている場合は長い治具で詰まりを取ってください。

* 注 ポットの上あたりまでしか入りません。

②ノズルの詰まり



ヘッド先端の詰まりの場合は細い治具で詰まりを取ってください。



ノズルは専用付属器具で取り外し出来ます。



小さい方で平らな部分に当てがって左回りに回してください。



ノズルに小さいOリングがついていますので戻す時はご注意ください。