

タイニープラストラブルシューティング

～砂詰まり解消方法について～




対象製品：タイニープラス

砂詰まりはお客様のお手元での解消する事が出来ます。

下記の手順に沿って点検及び清掃をお願い申し上げます。

必要な工具：

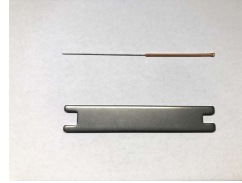

1, 写真①（**赤○**）にエアチューブ（内径4mm）に差込みます。

エアチューブは固定できていませんので手でしっかりと押し込んで下さい。

※写真②は、エアチューブを差込んだ状態になります。

2, エアチューブを本製品に押し込みながらエア供給します。

赤矢印(A)→から**赤矢印(B)→**にエアが導通しているか確認します。

エア導通が確認出来ない場合は、逆側からもエア噴射をお願い致します。（B側から）

3, 先端チップを専用工具で取外します。※写真④

取外した後、先端チップを専用工具にて清掃します。※写真⑥
清掃後はチップを取付して下さい。

4, 先端チップ側にエアチューブを差し込んで下さい。

エアチューブは固定できていませんので手でしっかりと押し込んで下さい。

エアチューブを本製品に押し込みながらエア供給します。

赤矢印(C)→から**赤矢印(D)→**にエアが導通しているか確認します。

エア導通が確認出来ない場合は、逆側からもエア噴射をお願い致します。（D側から）


以上、タイニープラスの砂詰まり解消方法になります。




写真①



写真②

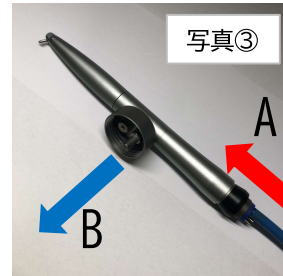


写真③

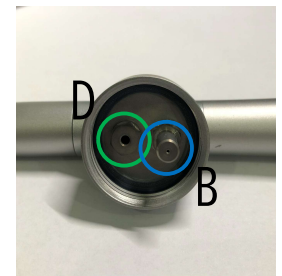

写真④



写真⑤

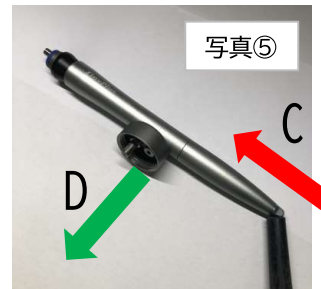

写真⑥



写真⑦

製品についての詳細は
弊社ホームページから▶

<http://www.dentalSupply.co.jp/>



株式会社 日本歯科商社

作成者：品質保証部 修理係

東京本社 〒130-0011 東京都墨田区石原1-19-5 TEL(03)3625-3111

大阪支店 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-3-9 TEL(06)6643-0085

北海道営業所 〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL(011)716-7001

九州営業所 〒812-0893 福岡市博多区那珂4-16-22 TEL(092)436-2288

作成日：2026/06/29