

義歯・口腔内装置用洗浄剤

洗浄力、除菌力だけで
ホントにいいの？

その洗浄剤
お口に
安心安全？

デリケートなお口の健康に寄り添う、
(※)
無添加の義歯・口腔内装置用
マルチクリーナー

※合成界面活性剤・酸化防止剤・
着色料・殺菌成分は添加していません。

NEW

シャボン玉 デンタルソープ

新規採用セール：実施期間2025年6月23日～7月18日まで

期間中は特別価格でご提供させていただきます

おすすめ
3つのポイント！

お口の粘膜にも
やさしい

たしかな
洗浄力・除菌力
バイオフィルム除去 ※2
〔肺炎桿菌・カンジダ菌〕
※1 ※2

天然のペパーミントで
すっきり・さわやか

※1 全ての菌を除菌するわけではありません。
※2 自社調べ



成分：水、純せっけん分（脂肪酸カリウム）、香料

ボトル：150mL

希望患者価格：1,100円

医院価格：935円

合成界面活性剤・酸化防止剤・着色料・
殺菌成分は添加していません。

使用可能



全て使用
OK!

〔 素材：アクリルレジン・シリコン・チタン・金銀パラジウム合金・コバルトクロム合金・
ニッケルクロム合金・EVA樹脂・オレフィン系熱可塑性エラストマー 〕

総入れ歯、部分入れ歯、マウスピース、矯正用リテーナー、スポーツ用マウスガード

※価格は希望医院価格です（価格には消費税が含まれていません）。



株式会社日本歯科商社
JAPAN DENTAL SUPPLY

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原1-19-5 TEL(03)3625-3111
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-3-9 TEL(06)6643-0085
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL(011)716-7001
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂4-16-22 TEL(092)436-2288

ご用命は

長年の信頼を築いたシャボン玉石けんの品質をベースに開発した、泡タイプの義歯・口腔内装置用洗浄剤。口腔内の健康と環境にも優しい選択です。

- きめ細かい泡によって義歯を手軽にすばやく洗浄する、ワンプッシュタイプのデンタルソープ。
- 無添加石けんの泡で汚れをしっかりと落とし清潔に保ちます。
- すすぎ性が高く、洗浄がスムーズに行えます。
- 使用した石けん分は短期間で生分解されますので環境にもやさしい。
- 総入れ歯、部分入れ歯、マウスピース、矯正用リテーナー、スポーツマウスガード(素材:アクリルレジン・シリコン・チタン・金銀パラジウム合金・コバルトクロム合金・ニッケルクロム合金・レジン・EVA樹脂・オレフィン系熱可塑性エラストマー他)使用可能。
- 装着時に天然由来のペパーミントによる爽快感を与えます。
- バイオフィーム除去効果、除菌効果(肺炎桿菌、カンジダ菌他)

洗浄方法

- 1 入れ歯に適量の泡をプッシュする。(目安:上の総入れ歯で2プッシュ)
- 2 柔らかいブラシで汚れをこすり洗います。(目安:約60秒)
- 3 洗浄後は流水ですすぐ。


※部分入れ歯、マウスピース、矯正用リテーナーも使用方法は同じです。

容量:150ml




吐出量:1プッシュ0.7ml

総プッシュ数:215プッシュ

■総義歯

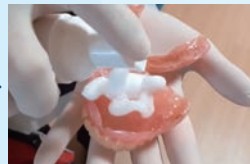


■部分義歯

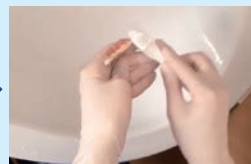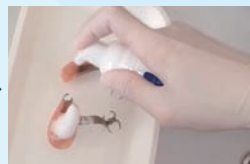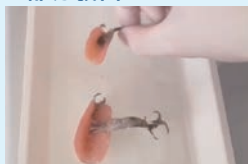

■義歯洗浄剤の除菌試験結果

シャボン玉石けん(株)調べ

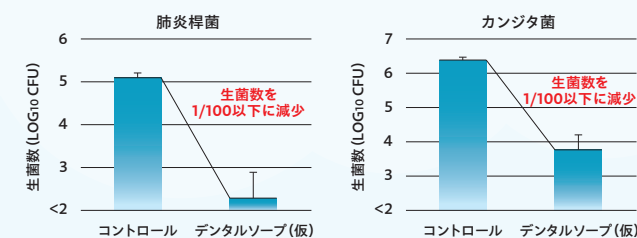

使用方法 | 洗浄剤を総義歯にポンプ2押し(約1.4mL)を目安に吐出し、義歯全体をブラシで磨いて流水ですすぐ。

サンプル | 義歯洗浄剤 シャボン玉 デンタルソープ

■バイオフィーム除去



使用方法 | 洗浄剤を総義歯にポンプ2押し(約1.4mL)を目安に吐出し、義歯全体をブラシで磨いて流水ですすぐ。

サンプル | 義歯洗浄剤 シャボン玉 デンタルソープ

シャボン玉石けんとは？

熟練の石けん職人が炊き上げる製造方法

製造名称	製造方法	期間
ケン化法 (釜炊き製法)	油脂(脂肪酸・グリセリン)+ 苛性ソーダ・苛性カリ ⇒ グリセリンを含む石けん	完成まで約1週間

※他の製造方法=中和法: グリセリンを抜いた脂肪酸を反応させるため、4~5時間で完成するが、天然の保湿成分(グリセリン)が残っていないため、添加物で補う。




シャボン玉石けんの特長

メリット1 身体にやさしい

合成界面活性剤・酸化防止剤・着色料・殺菌成分は添加していません。
敏感肌や乾燥肌の方、小さなお子様、ご年配の方も安心してご使用いただけます。



メリット2 環境にやさしい

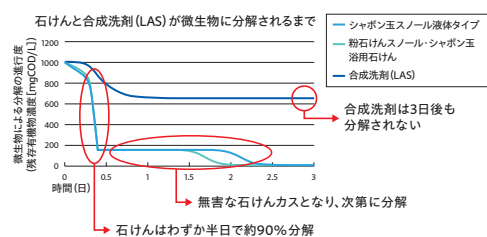

実験機関: 北九州市立大学 環境・消防技術開発センター

シャボン玉 販売株式会社

〒803-0812 福岡県北九州市小倉北区室町1-1-5F