



99 Suction Block®

一人診療時代— 開口保持＋吸引で 診療をスムーズに！

アシスタントなしでの治療時に役立ちます！

99 サクションブロック スモール／ミディアム（各5個入り）

【価格】¥15,000

一般的名称：歯科用開口器 医療機器分類：一般医療機器 届出番号：13B2X10104300389

サイズ	対象患者	幅 × 奥行(参考)
スモール	小児・口腔が小さい成人	約40.25×26.54mm
ミディアム	一般的な成人	約47.66×35.73mm



※オートクレープなどで滅菌を行うこと ※乾燥工程なし

121℃で15～20分

滅菌回数50回まで

今、お試しいただける
チャンスです！

《キャンペーン期間》2025年11月21日～2026年1月20日

99 Suction Block 新規採用キャンペーン

まずはお試しいただけるように、数量限定で、各サイズ1個入りを**特別価格**にてご提供いたします！

※1医院につき、各サイズ1つまでとなります。在庫が無くなり次第終了となります。

こんな治療に最適！



アシスタント
なしでの
治療時



形成
(ブレップ)



スケーリング



ラバーダム



レジン充填




テンポラリー
クラウンの
装着

使い方は簡単！




既存のサクションチップを
U字に曲げる

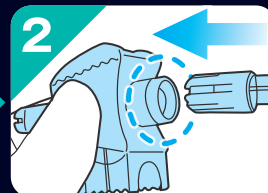

99サクションブロックに
サクションチップを差し込む



SEV(サクションホース)に
接続する

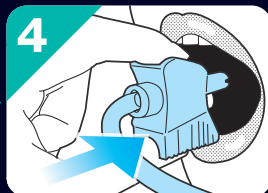

患者の口にやさしく固定する

紹介動画は
こちら！



※価格は希望医院価格です（価格には消費税は含まれておりません）。 ※本製品の仕様は予告なく変更することがあります。 ※印刷物のため、色は実物と多少異なることがあります。

キリトリ

ご注文書

キャンペーン期間：2025年11月21日～2026年1月20日

貴医院名			
ご住所 〒			
TEL ()			
お取引販売店	ご担当者	様	

対象製品		ご注文数
99 サクション ブロック	キャンペーン対象外	スモール 5個入り
	キャンペーン対象外	ミディアム 5個入り
	キャンペーン対象内	☐ スモール 1個入り
	キャンペーン対象内	☐ ミディアム 1個入り

※キャンペーン対象の「1個入り」には☑を入れてください。

※数量に限りがありますので、期間中でも完売になり次第終了させていただきます。あらかじめご了承願います。

ご用命は

ジーシーグループ

〔製造販売元〕



JAPAN DENTAL SUPPLY

株式会社日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288