

99 Suction Block[®]

一人診療時代— 開口保持＋吸引で 診療をスムーズに！

アシスタントなしでの治療時に役立ちます！

New!

99 サクションブロック Small/Midium (各5個入り)

【価格】 ¥15,000

一般的名称: 歯科用開口器 医療機器分類: 一般医療機器
届出番号: 13B2X10104300389

サイズ	対象患者	幅 × 奥行(参考)
Small	小児・口腔が小さい成人	約40.25×26.54mm
Midium	一般的な成人	約47.66×35.73mm



※オートクレーブなどで滅菌を行うこと。

135℃で3分または121℃で20分 滅菌回数50回まで

こんな
治療に最適！



アシスタントなし
での治療時



形成(ブレップ)



スケーリング



ラバーダム




レジン充填




テンポラリー
クラウンの装着


使い方は簡単！

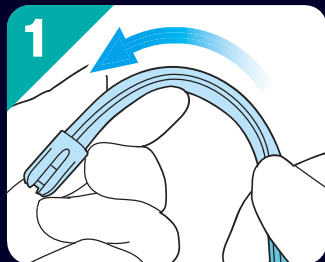


既存のサクションチップをU字に
曲げる

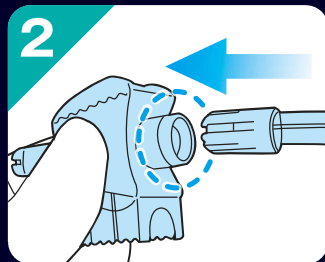

99サクションブロックに
サクションチップを差し込む

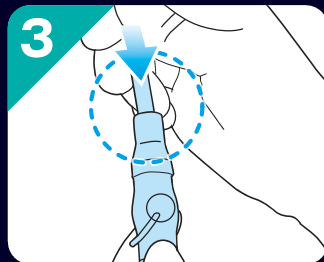

SEV(サクションホース)に接続する

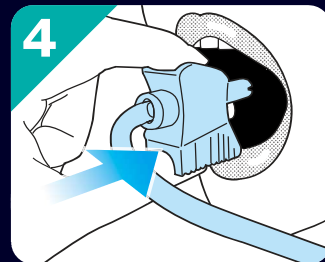

患者の口にやさしく固定する

※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。 ※本製品の仕様は予告なく変更することがあります。 ※印刷物のため、色は実物と多少異なることがあります。

ジーシーグループ 製造販売元



株式会社日本歯科商社

東京本社 〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085

北海道営業所 〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所 〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

製品についての詳細は弊社ホームページをご覧ください
<http://www.dentalsupply.co.jp/> ▶▶▶▶▶▶▶▶

