

## ヒッポ U


## 【禁忌・禁止】

- (1) 目的以外の使用禁止。歯科診療・歯科治療以外には使用しないこと。
- (2) 注意事項の厳守。器具の正しい使用のために、注意事項を必ず遵守すること。
- (3) 異常時の使用禁止。劣化や異常が見られた場合には、器具の使用を中止すること。
- (4) 改造の禁止。器具の形態変更や改造等は絶対にしないこと。
- (5) 本品に対しての発疹、皮膚炎等の過敏性の既往症がある患者には使用しないこと。
- (6) 再使用しないこと。

## 【形状・構造及び原理等】

サイズ：レギュラー 5 個入り、50 個入り

形状：

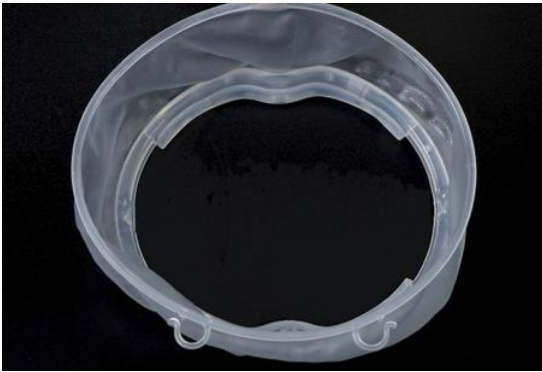

原材料 ハード部（リングおよびタブ）：ポリプロピレン  
ソフト部：熱可塑性樹脂（ラテックスフリー）

## 【使用目的又は効果】

歯科治療で患者の開口状態を保持する器具である。

## 【使用方法等】

- ① マウスオープナーに軽く水を吹きかけます。



- ② ミラーを使用しながら、患者の口の右側から装着します。



- ③ 同様に左側に装着します。



- ④ ミラーを使用しながら、上唇と下唇をきれいに整えます。



- ⑤ 中央のマークで正しく装着されていることを確認します。



## 【使用上の注意】

- ① 本品使用により発疹、皮膚炎等の過敏症状を起こした患者には、直ちに使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- ② ホワイトニングで使用する場合は、皮膚と粘膜の炎症等を避けるため、装着した本品と口腔軟組織の間にホワイトニング材が入り込まないように注意すること。

## 【保管方法及び有効期間等】

- ① 直射日光、高温、多湿を避けて、保管すること。
- ② 歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。

## 【保守・点検に係る事項】

- ① 使用前に破損、ひび、傷、および腐食等がないかを確認し、ある場合は、使用を中止すること。

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社日本歯科商社

製造業者

NEODEX Corp.（大韓民国）