

まだ  
『ヒッポ U』を  
試していませんか？

# ヒッポ U 新規採用キャンペーン



キャンペーン期間：2026年1月21日～3月19日

数量限定でヒッポ U レギュラーサイズ 5個入りを**特別価格**にてご提供いたします！

※1医院につき、1つまでとなります。在庫が無くなり次第終了となります。

NEW!!

一人診療時代！口腔内スキャナー撮影時、  
口唇や頬粘膜の排除が安定し、視野が確保されます

日本人に  
(平均口角間距離50～60mm)  
フィットしやすい  
快適サイズ設計！



外部リング付きで同時吸引  
サクションをしっかりホールド。  
ズレない安心、快適診療！

※サクションは付属しておりません。別途ご購入ください。

矯正 インプラント 前歯治療 補綴 ホワイトニング  
PMTc 光学印象 小児歯科 レジン充填 口腔内写真撮影

患者様の快適性を重視した設計で、ラテックスフリー素材を採用！

キャンペーン 特別価格 ヒッポ U レギュラーサイズ 5個入り  
新規採用キャンペーン【価格 オープン】

【通常】ヒッポ U レギュラーサイズ 50個入り【価格 14,000円】

〈サイズ(±2mm)〉内径(タテ×ヨコ):65mm(短径)×75mm 外径(タテ×ヨコ):85mm×95mm  
〈原材料〉ハード部(リングおよびタブ):ポリプロピレン ソフト部:熱可塑性樹脂(ラテックスフリー)

## POINT

一般的名称:歯科用開口器 医療機器分類:一般医療機器 届出番号:13B2X10104310391

- 装着したまま印象採得や咬合確認が可能
- 前歯の治療時には傘のように持ち上げることで、鼻からのエアロゾル侵入を防止
- 口唇排除のためのミラー不要
- 無歯顎の患者にも適応
- インプラント埋入や支台歯形成などの視野確保+吸引が同時にできる
- 両手を使えるため、縫合がより便利に



### 歯科医師のメリット

- ✓ 視野が改善され、治療時間が短縮
- ✓ 自動排除機能により、治療中の姿勢が楽に

### 患者さんのメリット

- ✓ 治療中でも口を閉じることができ、装着も簡単
- ✓ やわらかい素材で口が痛くならない



## 装着方法



1 水をスプレーします。  
(マウスオープナーに軽く水を  
吹きかけます)




2 右側に装着します。  
ミラーを使って、患者様の口の  
右側にデバイスを挿入します。



3 左側も同様に装着します。  
右側と同じ要領で左側に  
装着します。



4 上下の唇を整えます。  
ミラーを使って、上唇と下唇を  
きれいに整えます。

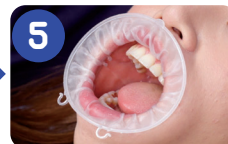

5 中央のマークで正しく装着  
できているか確認します。

※サクションチップまたは吸引コネクターを接続することで、開口と吸引を同時に行い、水分や唾液を自動的に吸引します。

イメージ動画は  
こちらから！



### 【使用上の注意】 【重要な基本的注意】

本品使用により発疹、皮膚炎等の過敏症状を起こした患者は、使用を中止し、直ちに医師の診断を受けさせること。本品は、耐滅菌ではないので、滅菌しないこと。  
清掃材や消毒材は本品に悪影響を与え、患者の不快感、状態を引き起こす恐れがあるので使用しないこと。

ホワイトニングで使用する場合は、皮膚と粘膜の炎症等を避けるため、装着した本品と口腔軟組織の間にホワイトニング材が入り込まないように注意すること。

※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。 ※本製品の仕様は予告なく変更することがあります。 ※印刷物のため、色は実物と多少異なることがあります。

## ご注文書

キャンペーン期間:2026年1月21日～3月19日

貴医院名	
ご住所 〒	
TEL ( )	
お取引販売店	ご担当者 様

対象製品	ご注文数
ヒッポ U レギュラーサイズ	50個入り
	<input type="checkbox"/> 5個入り ※キャンペーン対象の「5個入り」には ☑を入れてください。

※数量に限りがありますので、期間中でも完売になり次第終了させていただきます。あらかじめご了承願います。

ジーシーグループ

【製造販売元】



株式会社日本歯科商社

東京本社:〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111  
大阪支店:〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085  
北海道営業所:〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001  
九州営業所:〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご用命は