

## Hippo-U 使用マニュアル

### 【使用目的又は効果】

歯科治療で患者の開口状態を保持する器具です。

### 【使用方法】

#### Hippo-U 装着方法



1.水をスプレーします。

(マウスオープナーに軽く水を吹きかけます)



2.右側に装着します。

ミラーを使って、患者様の口の右側に挿入します。



3.左側も同様に装着します。

右側と同じ要領で左側に装着します。



4.上下の唇を整えます。

ミラーを使って、上唇と下唇をきれいに整えます。



5.中央マークで装着状態を確認します。

Hippo-U 中央のマークで正しく装着できているか確認します。

※サクションチップまたは吸引コネクターを接続することで、開口と吸引を同時に行い、  
水分や唾液を自動的に吸引します。

### 【使用上の注意】

#### 〔重要な基本的注意〕

本品使用により発疹、皮膚炎等の過敏症状を起こした患者は、使用を中止し、直ちに医師の診断を受けさせること。本品は、耐滅菌ではないので、滅菌しないこと。

清掃材や消毒材は本品に悪影響を与え、患者の不快症状を引き起こす恐れがあるので使用しないこと。  
ホワイティングで使用する場合は、皮膚と粘膜の炎症等を避けるため、装着した本品と口腔軟組織の間にホワイティング材が入り込まないように注意すること。