


99 Suction Block<sup>®</sup>

一人診療時代  
開口保持＋吸引で  
診療をスムーズに!

アシスタントなしでの治療時に役立ちます!

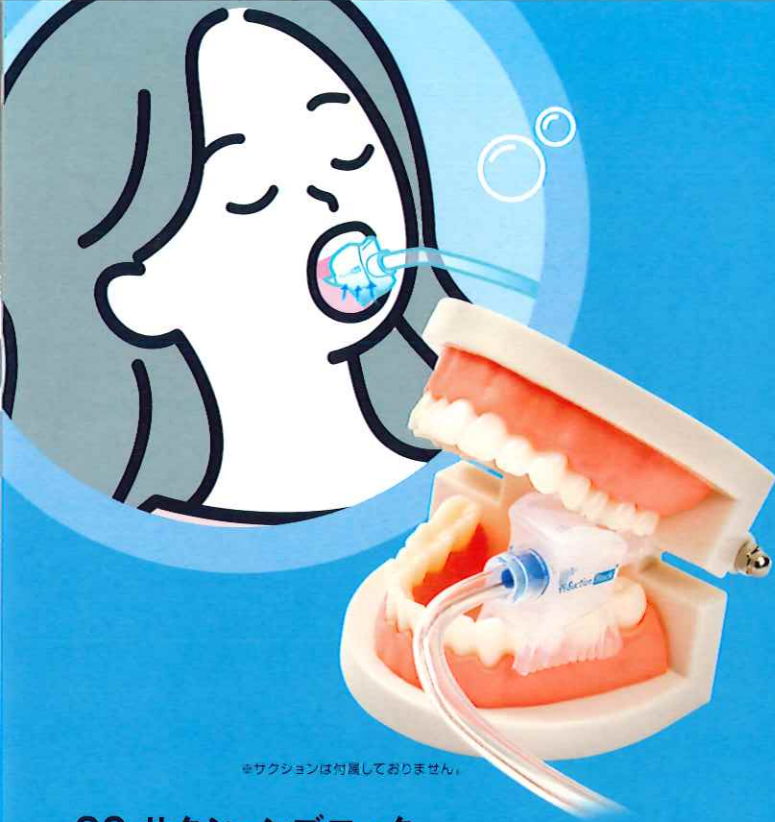

※サクシオンは付属しておりません。

99 サクシオンブロック  
スモール 5個入り (価格) ¥15,000


99 サクシオンブロック  
ミディアム 5個入り (価格) ¥15,000

一般約名称: 歯科用開口器 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104300389

サイズ	対象患者	幅 × 奥行(参考)
スモール	小児・口腔が小さい成人	約40.25×26.54mm
ミディアム	一般的な成人	約47.66×35.73mm

※オートクレープなどで滅菌を行うこと  
※乾燥工程なし

121℃で15~20分 滅菌回数50回まで

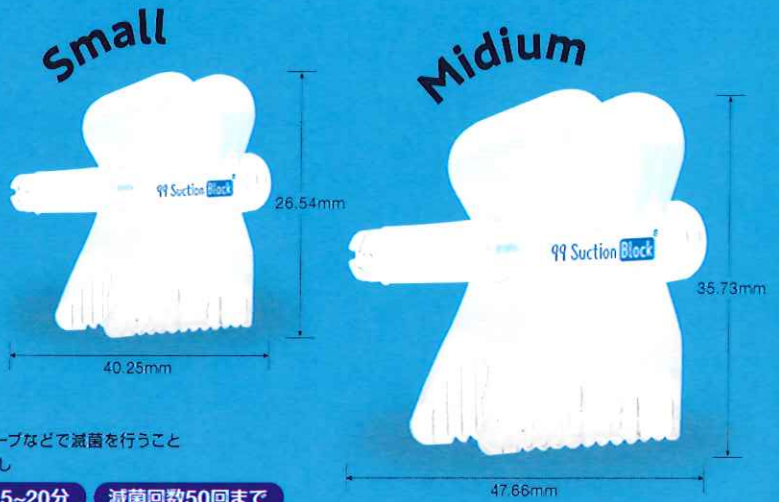

《キャンペーン期間》2026年5月21日～6月19日

今、お試しいただける  
チャンスです!

99 サクシオンブロック 5個入り ご愛顧キャンペーン

まずはお試しいただけるように、  
数量限定で、スモールまたはミディアム 5個入りを **特別価格** にてご提供いたします!

こんな  
治療に最適!

- アシスタントなしでの治療時
- 形成 (プレップ)
- スケーリング
- ラバーダム
- レジン充填
- デンポラリークラウンの装着

使い方は簡単!




1 既存のサクシオンチップをU字に曲げる



2 99サクシオンブロックにサクシオンチップを差し込む



3 SEV(サクシオンホース)に接続する

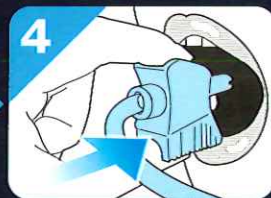

4 患者の口にやさしく固定する

※バイトブロックのアーチ部を下顎歯部に被せるように挿入し、上下顎で噛ませ開口状態を保持する。

使用方法動画はこちら!



※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。 ※本製品の仕様は予告なく変更することがあります。 ※印刷物のため、色は実物と多少異なることがあります。

ご用命は

ジーシーグループ

[ 製造販売元 ]



JAPAN DENTAL SUPPLY

株式会社日本歯科商社

東京本社: 〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111  
大阪支店: 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085  
北海道営業所: 〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001  
九州営業所: 〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288