

まだ『ヒッポ U』を試していませんか？

ヒッポU 新規採用キャンペーン



HIPPOU

口腔内スキャナー撮影時、 口唇や頬粘膜の排除が安定し、 視野が確保されます

キャンペーン期間

7月21日

～
8月20日

期間中、ヒッポU レギュラーサイズ 50個入りを
特別価格でご提供します！



日本人にフィットしやすい快適サイズ設計！

(平均口角間距離50～60mm)

矯正

インプラント

前歯治療

補綴

ホワイトニング

PMTc

光学印象

小児歯科

レジン充填

口腔内写真撮影

患者様の快適性を重視した設計で、ラテックスフリー素材を採用！

歯科用開口器

ヒッポ U

レギュラーサイズ 50個入り【価格】14,000円

サイズ(±2mm)

内径(タテ×ヨコ):65mm(短径) × 75mm
外径(タテ×ヨコ):85mm × 95mm

原材料

ハード部(リングおよびタブ):ポリプロピレン
ソフト部:熱可塑性樹脂(ラテックスフリー)

一般的名称:歯科用開口器 医療機器分類:一般医療機器
届出番号:13B2X10104310391

NEW!



※サクシオンは付属しておりません。別途ご購入ください。

外部リング付きで吸引サクシオンをしっかり固定。
開口と吸引を同時に行え、診療をさらにスムーズに！

POINT

- 装着したまま印象採得や咬合確認が可能
- 前歯の治療時には傘のように持ち上げることで、鼻からのエアロゾル侵入を防止
- 口唇排除のためのミラー不要 ● 無歯顎の患者にも適応
- インプラント埋入や支台歯形成などの視野確保+吸引が同時にできる
- 両手を使えるため、縫合がより便利に

歯科医師のメリット

- ☑ 視野が改善され、治療時間が短縮
- ☑ 自動排除機能により、治療中の姿勢が楽に

患者さんのメリット

- ☑ 治療中でも口を閉じることができ、装着も簡単
- ☑ やわらかい素材で口が痛くなりにくい



1

水をスプレーします。
(マウスオープナーに軽く水を
吹きかけます)

2

右側に装着します。
ミラーを使って、患者様の口の
右側にデバイスを挿入します。

3

左側も同様に装着します。
右側と同じ要領で左側に
装着します。

4

上下の唇を整えます。
ミラーを使って、上唇と下唇を
きれいに整えます。

5

中央のマークで正しく装着
できているか確認します。

※サクシオンチップまたは吸引コネクターを接続することで、開口と吸引を同時に行い、水分や唾液を自動的に吸引します。

【使用上の注意】 【重要な基本的注意】

本品使用により発疹、皮膚炎等の過敏症状を起こした患者は、使用を中止し、直ちに医師の診断を受けさせること。本品は、耐滅菌ではないので、滅菌しないこと。
清掃材や消毒材は本品に悪影響を与え、患者の不快感を引き起こす恐れがあるので使用しないこと。

ホワイトニングで使用する場合は、皮膚と粘膜の炎症等を避けるため、装着した本品と口腔軟組織の間にホワイトニング材が入り込まないように注意すること。

※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。 ※本製品の仕様は予告なく変更することがあります。 ※印刷物のため、色は実物と多少異なることがあります。

ご用命は

ジーシーグループ

【製造販売元】



JAPAN DENTAL SUPPLY

株式会社日本歯科商社

東京本社:〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店:〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所:〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所:〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

イメージ動画は
こちらから！

